

Phonak Fast Facts



Phonak DECT Schnurlostelefon

Was ist es?

Das Phonak DECT CP1 ist ein Schnurlostelefon, das sich ideal für zu Hause oder kleine Büros eignet. Die Stimme des Anrufers wird drahtlos auf beide Hörgeräte übertragen. Damit können Hörgeräteträger am Telefon in bester Klangqualität hören und klar verstehen.

Neben der Streaming-Funktion hat das Telefon auch einen normalen akustischen Hörer und kann daher auch von Personen ohne Hörgerät benutzt werden. Es können bis zu sechs Mobilteile mit einer Basisstation verbunden werden, was unter anderem für die Verwendung in kleinen Büros nützlich ist. Die Telefonfunktionen: 12 Klingeltöne, Lautstärketasten, Verstärkungstaste, Freisprechmodus, Vibrationsfunktion und mehr.

Was bringt es?

Hörgeräteträger empfinden das Telefonieren oft als Herausforderung, vor allem wenn sie einen starken Hörverlust haben. Durch die Übertragung der Anruferstimme auf beide Hörgeräte wird die Sprachverständlichkeit am Telefon verbessert, vor allem wenn laute Hintergrundgeräusche vorhanden sind. Unabhängige Studien haben gezeigt, dass das Phonak DECT Schnurlostelefon, im Vergleich zu herkömmlichen Telefonen, eine Verbesserung der Sprachverständlichkeit um bis zu 40% bietet.¹

Wie wird es benutzt?

Das Phonak DECT Schnurlostelefon ist sehr einfach zu bedienen – weder eine Programmierung noch zusätzliche Geräte sind dazu erforderlich – einfach abnehmen und telefonieren! Es

kann wie ein herkömmliches Telefon verwendet werden – es müssen keine Hörprogramme gewechselt werden. Der Benutzer hält das Telefon ganz normal am Ohr (oder im Abstand von maximal 25 cm zum Hörgerät) und die Anruferstimme wird automatisch übertragen.

Eine schnelle und überzeugende Demonstration der überragenden Klangqualität erhalten Sie, indem Sie die Verstärkungstaste zwei Sekunden lang drücken.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.phonakpro.com/dectphone



¹ Schulte, M. (2013) Preliminary Results, Phonak DECT Studie, Hörzentrum Oldenburg, Deutschland